

# טוליפ – מגן פטמה

הוראות שימוש



 ARDO

לחווית הנקה קלה ונוחה

## הוראות שימוש:

לפני השימוש יש לשטוף היטב ידיים עם מים וסבון

1. לפני השימוש יש לשטוף היטב ידיים עם מים וסבון
2. הרטיבי את חלקו הפנימי של מגן הפטמה במעט חלב אם או מים, או השתמשי בקרם לנולין לפטמה, כדי להצמידו ביתר קלות לשד. משכי את קצה מגן הפטמה ומקמי את המגן סביב מרכז הפטמה. אפו של התינוק צריך להיות מול הפתח בצורת פרח, כך שהוא נוגע בעורה של האם (איור 1).
3. שחררי את קצות מגן הפטמה אל השד (איור 2).

## שימי לב:

השתמשי אך ורק בזמן ההנקה. לאחר השימוש הסירי ונקי בהתאם להוראות. עיקור והרתחה תכופים גורמים להתבלות מהירה יותר.

מומלץ לתת למגני הפטמה להתייבש לפני אחסונם בקופסת האחסון. אל תשתמשי במגני הפטמה אם נראים סימנים של שחיקה.

יש לאחסן את מגני הפטמה מחוץ להישג ידם של ילדים. אם יש לך שאלות, אנא פני למומחה רפואי. מגני פטמה טוליפ אינם מכילים לטקס.

## ניקוי / עיקור:


בבית: לפני השימוש הראשון הרתיחי את הפטמות במים למשך 10 דקות, ולאחר מכן פעם אחת ביום. לאחר כל שימוש יש לנקות במים וסבון, שטפי היטב והניחי לייבוש על מגבת נקייה.

מגני הפטמה וקופסת האחסון מתאימים לשימוש גם במדיח כלים. בבית החולים: מגני פטמה: עיקור ב-121 מעלות צלזיוס = 20 דקות / 134 מעלות צלזיוס = 18 דקות וחיטוי תרמי 93 מעלות צלזיוס = 10 דקות. קופסת האחסון: חיטוי תרמי 93 מעלות צלזיוס = 10 דקות.


## סילוק:

אינו מזיק, בהתאם לתקנות המקומיות.

1.)

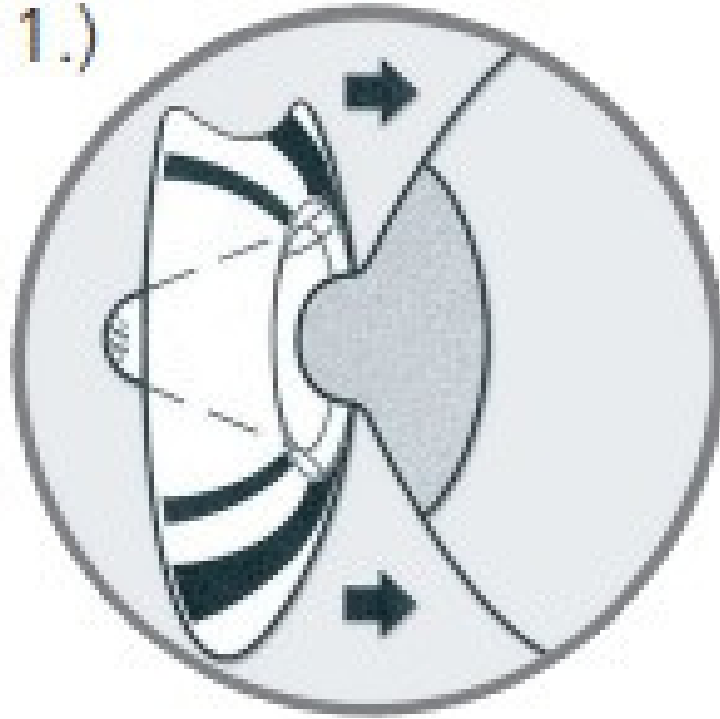

2.)

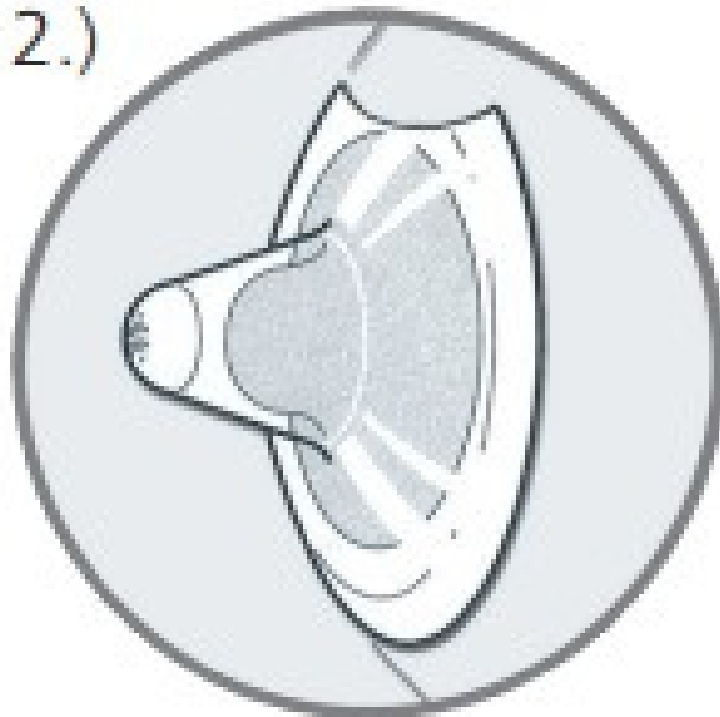

## **האריזה מכילה:**

שני מגני פטמה מסיליקון, מידה M (20 מ"מ) או L (24 מ"מ), S (16 מ"מ)  
קופסת אחסון אחת, עותק אחד של הוראות השימוש.

## **התוויה:**

מגני פטמה טוליפ מתאימים לשימוש לטווח קצר על מנת לסייע  
בהתחברות התינוק אל השד ולהגנה על פטמות כואבות ורגישות בזמן  
ההנקה.

יש לשמור את כל הרכיבים מחוץ להישג ידם של ילדים

**היבואן: שיווק ממוקד, חנה סנש 45 הוד השרון**

**היצרן: Ardo Medical AG, Gewerbestrasse Unteraegeri, Switzerland**

**שירות לקוחות: 09-7902306 [www.ardo.co.il](http://www.ardo.co.il)**