

סט בקבוקים
הוראות שימוש



 ARDO

הוראות שימוש סט בקבוקים לחלב אם יש לעיין בהוראות השימוש הנמצאות בתוך האריזה

האריזה מכילה:

3 בקבוקים (150 מ"ל), 3 טבעות, 3 מכסים

שימוש מיועד:

בקבוק לחלב אם המיועד לשאיבה (בשילוב עם ערכת שאיבה), אחסון והאכלה של חלב אם. הוא מיועד לשימוש רב פעמי ויכול לעבור סטריליזציה בטוחה.

שאיבת חלב אם

כדי לשאוב חלב אם, חברי את בקבוק החלב ישירות לערכת השאיבה (ערכת שאיבה של Ardo).

אחסון חלב אם

לאחר שאיבת החלב, סגרי את הבקבוק באמצעות המכסה. ניתן לאחסן חלב האם כדלקמן:

- בטמפרטורת החדר 16°C – 29°C משך אחסון מומלץ: 3-4 שעות. ניתן להשאיר בטמפרטורה זו במשך 6-8 שעות אם החלב מאוחסן בתנאים היגייניים מאוד.
- במקרר $4^{\circ}\text{C} \leq$ משך אחסון מומלץ: 72 שעות. ניתן להשאיר במקרר במשך 5-8 ימים אם החלב מאוחסן בתנאים היגייניים מאוד.
- במקפיא $17^{\circ}\text{C} <$ משך אחסון מומלץ: 6 חודשים, ניתן להשאיר במקפיא עד שנה. אין למלא בבקבוק יותר מ-150 מ"ל, מפני שהחלב מתפשט כאשר הוא קופא.

האכלה בחלב אם

על ההנקה להיות מבוססת היטב לפני שמאכילים בשיטות אחרות.

מפשירים חלב אם שאוחסן במקפיא, תחילה במקרר או בטמפרטורת החדר. לאחר מכן מחממים את חלב האם לטמפרטורה של כ-37°C על ידי טבילת הבקבוק במים חמים או החזקתו תחת מים פושרים זורמים. אין לחמם חלב אם במיקרוגל.

הוראות ניקוי:

- לפני השימוש בפעם הראשונה, יש לפרק את כל הרכיבים ולשים אותם בסיר גדול מלא במים. מרתיחים במשך 10 דקות. לאחר רתיחה, מניחים את הרכיבים על משטח נקי ומאפשרים להם להתייבש באוויר.
- לאחר כל שימוש, יש לרחוץ את כל רכיבי הבקבוק עם נוזל כלים ולשטוף היטב. יש להרתיח את הרכיבים פעם ביום למשך 10 דקות או להשתמש בשיטות

הניקוי הבאות:

1. מדיח הכלים

2. שקית Easy Clean Ardo למיקרוגל

3. סטריליזטור אדים

לאחר הניקוי, יש לתת לכל הרכיבים להתייבש באוויר ולכסות במטלית נקייה.

החומר
בקבוק חלב, טבעת, מכסה: פוליפרופילן
הערה חשובה: בקבוקים ומכסים מפלסטיק עשויים
להפוך לשבירים כשמקפיאים אותם ולהינזק אם
מפילים אותם. **אין להשתמש** בחלב האם, אם נגרם
נזק לבקבוקים ולמכסים.

"שמור את כל הרכיבים שאינם
בשימוש הרחוק מהישג ידם של ילדים"

השלכה
בהתאם לתקנות המקומיות



x 3



אינו מכיל ביספנוול A

היבואן – שיווק ממוקד – תמר ארידור הלוי
רח' חנה סנש 45 הוד השרון



היצרן

Ardo medical AG
Gewerbstrasse
19

Unterägeri 6314
Switzerland

T +41(0)41 754 70 70
F +41(0)41 754 70 71

CE
0123