

ארדו CARE רפידות ג'ל טיפוליות – הוראות שימוש Ardo Care Compresses

התוויות ותחומי שימוש: רפידות ג'ל ארדו CARE מספקות לאימהות מניקות טיפול ותמיכה טבעיים לטיפול בפטמות פצועות, מגורות או כואבות. הג'ל על הרפידה, העשויה בד לא ארוג, מסייע בהתחדשות הטבעית של העור. הוא מוסיף לחות לעור ונעים בקרירותו, מרגיע את העור, וגורם לו להיות רך וחלק.

מינון ושימוש:

1. יש לשטוף היטב את הידיים במים ובסבון.
2. יש להניח רפידת Ardo Care Compress כאשר צד הג'ל מונח ישירות על הפטמה. מעל הרפידה יש להניח רפידת הנקה רגילה.
3. יש להשאיר את הרפידה במקומה בהתאם לצורך, למשך 10 דקות לפחות. מומלץ להשאירה למשך כ- 30 דקות, ועד שעה לכל היותר. אין צורך להסיר או לנגב את שאריות הג'ל מהשד לפני ההנקה. הג'ל אינו מזיק לתינוק.
4. יש לחזור על הטיפול לפחות פעמיים ביום, עד להיעלמות הגירוי/כאב. מטעמי היגיינה, כל רפידה מיועדת לשימוש חד-פעמי בלבד.

סוג המתן: לשימוש מקומי על הפטמות.

אמצעי זהירות: אין צורך בנקיטת אמצעי זהירות.

תופעות לוואי: אין תופעות לוואי ידועות.

תגובות בין תרופתיות: לא דווחו מקרים של תגובות בין תרופתיות.

התוויות נגד: אין להשתמש במקרה של רגישות יתר ידועה לאחד מהמרכיבים הרשומים.

הערות למשתמשים: לפי תקנה 2017/745 (EU) לאביזרים רפואיים, תאונות חמורות המתרחשות בקשר למוצר חייבות בדיווח ליצרן ולרשויות המוסמכות של המדינה החברה באיחוד האירופי שבה מתגוררת המשתמשת.

צורת המינון והתכולה: 12 רפידות רכות המגיעות עם ג'ל בצדן האחד, ארוזות ב-12 שקיקים היגייניים ונוחים לשימוש, כל שקיק מכיל רפידה יחידה. הצד האחורי של רפידת הג'ל מצופה, למניעת הכתמת הבגדים.

תכונות וצורה פרמצבטית: ג'ל חסר ריח וחסר צבע על בסיס טבעי, המיושם על רפידת בד לא ארוג עם ציפוי בצדה האחד. הצורה המעוגלת מבטיחה התאמה מיטבית. רפידות הג'ל ארוזות לשימוש חד-פעמי ואין מכילות רכיבים פעילים רפואיים כלשהם. טבעוני.

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את רפידות ג'ל ארדו CARE בטווח טמפרטורות של 5°C עד 30°C ולהגן עליהן מפני אור. תאריך התפוגה מודפס על השקיק ועל האריזה. אין להשתמש ברפידות ג'ל ארדו CARE לאחר תאריך התפוגה

היבואן: שיווק ממוקד ת.ד. 6424 הוד השרון

المستورد: توزيع ممرکز - تمار اريدور هليقي صندوق بريد 6424 هود هشارون

שרות לקוחות 09-7902306 אתר www.ardo.co.il

ברישיין משרד הבריאות - ארץ יצור איחוד אירופאי